


**Modelo**
**PH NEUTRO DUO 500 ml**
**Referencia**
**11711**
**Características**

Solución fostato estéril de 4,9% que neutraliza rápidamente ácidos y álcalis. Equipada con la copa ocular *Duo* que permite lavar ambos ojos simultáneamente. Puede utilizarse individualmente o como repuesto en las estaciones de lavado de ojos *Duo*.

Una intervención inmediata y eficaz es fundamental para limitar el alcance de las lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis. Las lesiones por quemaduras químicas son siempre graves ya que se producen en un corto espacio de tiempo. Muchos accidentes laborales afectan a ambos ojos. Hasta ahora no existía ningún lavaojos móvil capaz de enjuagar ambos ojos a la vez. Por eso, en caso de accidentes graves, ya es posible limpiar ambos ojos al mismo tiempo.

La forma de las copas oculares ayuda a mantener los ojos abiertos.

Copa ocular doble especial para situaciones laborales con riesgo de producirse lesiones de ácidos y álcalis en ambos ojos.

\*\* Vea los valores pH en la pág. 2

**Aplicaciones**

Para limpiar ambos ojos a la vez. Si ambos ojos se ven afectados (p. e. ácido u otras sustancias nocivas). Con Duo un flujo suave enjuaga y extrae la sustancia nociva de los ojos

**ENVASE**

500 ml

**TIEMPO DE LAVADO**

2 min. aprox.

**UNIDAD DE EMBALAJE**


1 ud





Una intervención inmediata y eficaz es fundamental para limitar alcance de las lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis. Las lesiones por quemaduras químicas son siempre graves ya que se producen en un corto espacio de tiempo.

**Figura 1:** Efecto neutralizante de pH Neutral y cloruro de sodio al 0,9%\*

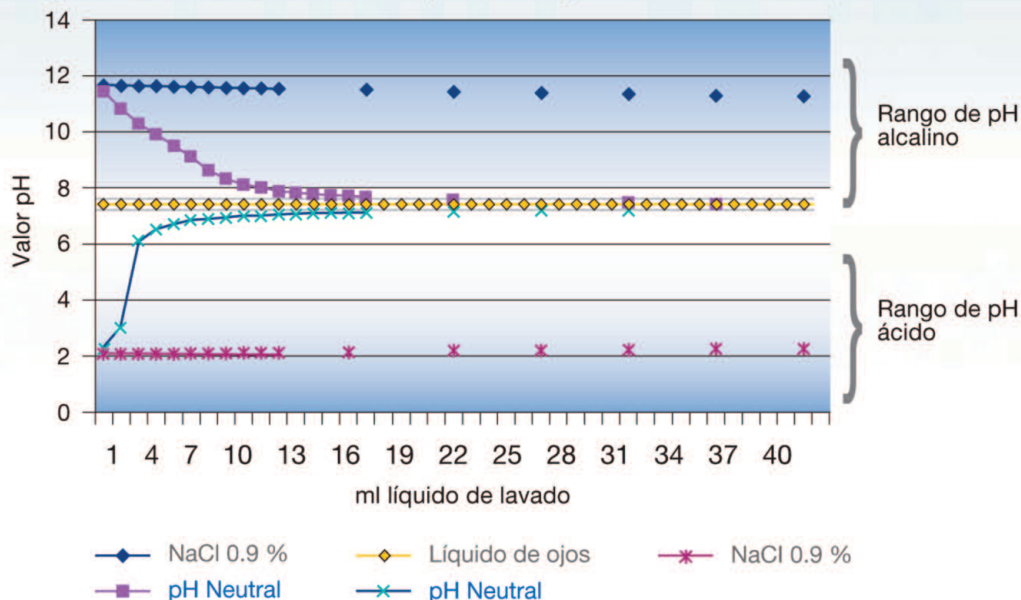

\* Prueba de valoración realizada en laboratorio (in vitro) por Plum A/S. La prueba fue realizada paso a paso añadiendo pH Neutral y cloruro de sodio al 0,9 % a un solución que contenía 1 gota de ácido sulfúrico + 40 ml de agua y 1 gota de hidróxido de potasio + 40 ml de agua respectivamente. Se midió el cambio del valor pH y la cantidad de líquido de lavado.

### Adaptado a tus necesidades

pH Neutral está disponible en una práctica botella de 200 ml que puede colocarse fácilmente cerca del lugar de trabajo,

en la caja de herramientas o en el botiquín. pH Neutral también está disponible en una botella de 500 ml con una copa ocular doble especial para situaciones laborales con riesgo de producirse lesiones de ácidos y álcalis en ambos ojos. Ambas botellas tienen un tiempo de lavado de aprox. 2 minutos.

### Un par de sencillos movimientos y puede empezar a enjuagar

- Girar la copa ocular en sentido de la flecha hasta romper el precinto.
- Inclinar la cabeza hacia atrás y enjuagar.

